

Andningsskydd

Andningsskydd ska användas vid vård av patient med smittsam covid-19 (FFP2 eller FFP3) samt hos patient med luftburen smitta, som tuberkulos eller mässling (FFP3). Andningsskydd ska inte sättas på patient.

Det är viktigt att andningsskyddet sluter tätt. Vid skäggväxt är det svårt att få andningsskyddet att sluta tätt vilket innebär risk för smitta.

- Andningsskyddet är engångs, personligt och kasseras efter varje användning. Om andningsskyddet blir fuktigt eller nedsolkat ska det genast kasseras och nytt andningsskydd tas på.
- Andningsskyddet sätts på utanför vårdrummet, i slussen eller dylikt.
- Desinfektera alltid händerna direkt efter användning av andningsskyddet.
- Andningsskydd behöver ofta kompletteras med skyddsglasögon eller visir.



Användning av andningsskydd med eller utan ventil

1



Forma näsbygeln genom att böja den försiktigt. Lagg masken i ena handen och vik ut den undre delen för att forma masken till en kupa.

Vänd masken och ta tag med andra handen i banden.

2



Ta på andningsskyddet genom att placera nederdelen under hakan och lägg det över mun och näsa. Dra banden över huvudet. Se till att banden inte vrider sig.

Placera det undre bandet runt nacken och det övre uppe på huvudet.

3



Tryck till metallbygeln över näsbenet med båda händerna. Se till att andningsskyddet sluter tätt runt näsa kinder och haka.

Testa att andningsskyddet sluter tätt genom:

- en kraftig utandning (skydd **utan ventil**)
- en kraftig inandning (skydd **med ventil**).

Känner du läckage av luft, justera och testa igen. Andningsskyddet är engångs, kasseras efter användning. Desinfektera händerna.