

Serum/plasma hälls av i plaströr, artikelnr: 49711 (klar, genomskinlig 75 x 13 mm)

<b>Hälls alltid av</b>		
<b>Ext</b>	<b>Analys</b>	<b>Kommentar</b>
03	Endast Digoxin	
1H	Insulin, C-peptid	Fryses inom 24 h
23	Koagulation (andra analyser än PK)	Kontrollera hållbarheten, måste ofta frysas.  Om PK är beställt på samma rör hälls hela röret av och fryses.
27	Homocystein	
28	PTH	
29	MMA	
33	Läkemedel	
3A	Apo-kvot	
43	P-Hemoglobin	
72	Heparin/Apixaban	Fryses
80	Zink	
9K	KUB	Fryses inom 24 h
MP, MS	HIV/Hepatit PCR	

<b>Hälls inte av.</b>		
<b>Ext</b>	<b>Analys</b>	<b>Kommentar</b>
37	Allergi	
53	Bik, fritt Ca	Korken får ej öppnas.
55	PSA	Plasma hållbart 3,5 dygn.  Hälls av och fryses om denna tid överskrids.
MA, MB MC, MD MF	Serologi till mikrobiologen	

**Pappersutskrift**

LmD: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.

Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.

**Behöver inte hällas av mån-tors.**

**Hälls av efter sista transporten på torsdag till söndag eftermiddag.**

Ext	Analys	Kommentar
01	Rutinkemi	
03	Hormon, B12, Folat (ej Digoxin)	
05	HCG	
08	Proteiner	
10	Osmolalitet, plasma	
26	Cancermarkörer	
2A	ANCA	
31	CDT	
32	LD, Litium	
47	Prolaktin	
52	Läkemedel	
59	D-vitamin, Hormoner	

## DOKUMENTHISTORIK

### Förändring i aktuell utgåva

Sida	Förändring
	Nytt dokument anpassat efter nya transporter via Mora

#### Pappersutskrift

LmD: Dokument som skrivits ut på vitt papper är ej dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Utskrift på färgat papper signerad av kvalitetsombud är dokumentstyrd kopia.

Vårdenhet: Vitt papper är dokumentstyrd kopia.